


SmartCase SC1230 / SC1240

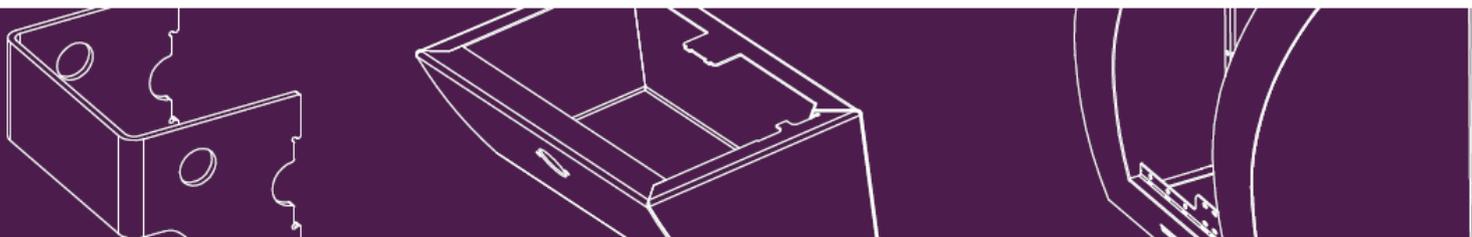



Índice

O QUE É UMA SMARTCASE?	3
PARA SUA SEGURANÇA	3
CONVENÇÕES.....	3
GARANTIA	4
VISÃO GERAL DO PRODUTO	5
INSTALAÇÃO	6
IMPORTANTE	6
SUSPENSÃO EM PEDRA OU BETÃO	6
FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO	6
ADVERTÊNCIA	7
SUSPENSÃO SOBRE MADEIRA.....	7
UTILIZAÇÃO	7
IMPORTANTE	7
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	8
MANUTENÇÃO	8
TEMPERATURA	8
PERSONALIZAR O CÓDIGO (SC1240)	9
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	10
GLOSSÁRIO.....	11
APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	12



O que é uma SmartCase?

O DEA (Desfibrilhador Automático Externo) é um dispositivo médico importante para assistência em caso de insuficiência cardíaca. É fundamental que o DEA esteja protegido, seguro e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para suporte imediato em caso de emergência. O gabinete SmartCase oferece proteção ideal e garante que o DEA esteja disponível dia e noite.


O armário exterior SmartCase foi concebido para proteger o DAE de condições climáticas extremas. A caixa é resistente à água e ao pó, ao vandalismo e combina um conceito comprovado com o máximo desempenho. A caixa de aço inoxidável, combinada com uma janela de policarbonato, oferece a melhor proteção contra a corrosão e os impactos e proporciona uma visão clara do DAE. Para garantir uma temperatura superior a 0°C, a caixa exterior SmartCase está equipada com um sensor de temperatura e um elemento de aquecimento elétrico. A caixa está totalmente isolada para poupar energia durante o aquecimento. Além disso, o DAE está protegido contra o sobreaquecimento através de ventilação ativa.

Para sua segurança

Convenções Leia atentamente o manual de funcionamento. Os instaladores e operadores devem rever as instruções de segurança antes de utilizarem o armário SmartCase AED. O não cumprimento das instruções contidas neste documento pode ser perigoso ou ilegal. Siga todas as instruções de manutenção recomendadas. Se ocorrer um problema, contacte o seu revendedor.

		Símbolo
Aviso:	O símbolo de aviso alerta-o para situações ou acções que podem causar perigo	 AVISO

A GT MEDICARE reserva-se o direito de modificar ou melhorar este documento e todos os produtos relacionados neste manual sem aviso prévio. O conteúdo deste documento é disponibilizado sem qualquer tipo de garantia.

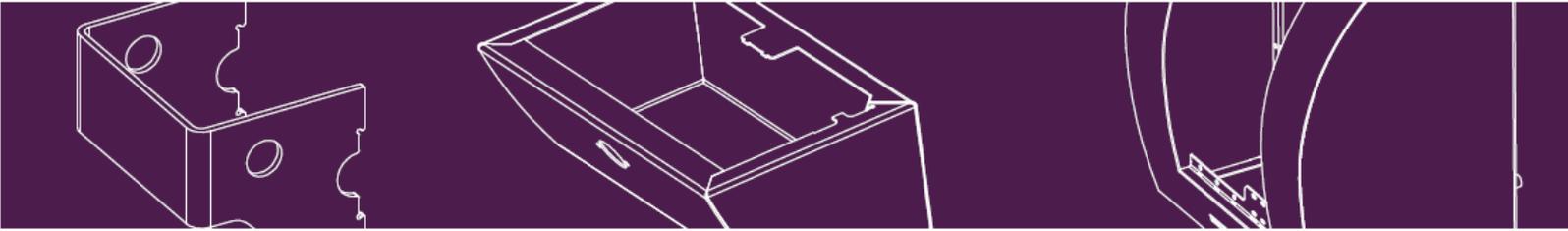

Garantia

1. A GT MEDICARE garante a qualidade dos serviços por ela prestados, na medida dos seus conhecimentos e capacidades, bem como a solidez e a boa qualidade dos produtos por ela fornecidos. A garantia não vai além das disposições abaixo mencionadas.
2. Se os defeitos forem causados pelo comprador, todos os custos de reparação e de envio serão da responsabilidade do comprador.
3. O comprador não pode invocar a cláusula de garantia:
 - A: No caso de o comprador ter negligenciado os produtos.
 - B: No caso de o comprador ter efectuado ou mandado efectuar alterações nos produtos, incluindo reparações não efectuadas por ou em nome da GT MEDICARE.
 - C: Em caso de utilização imprudente ou descuidada, ligação errada, tensão de rede errada, queda de raio, danos devidos à humidade ou a outros produtos ou calamidades externas.
 - D: Se o aparelho não tiver sido mantido da forma habitual ou como descrito no manual do utilizador.
 - E: Se o aparelho for utilizado com acessórios inadequados.
 - F: Se o comprador tiver tratado os produtos de qualquer outra forma negligente.
4. A GT MEDICARE garante que os produtos não contêm defeitos graves no momento da entrega.
5. O Revendedor deve comunicar à GT MEDICARE, por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar da receção dos Produtos nas instalações do Revendedor, as reclamações relativas a defeitos, danos ou não conformidade dos Produtos que possam ser razoavelmente determinados após inspeção dos Produtos. O Revendedor deve comunicar todas as outras reclamações por escrito à GT MEDICARE no prazo de 1 ano a partir da data de entrega. O Revendedor deve devolver imediatamente à GT MEDICARE, a pedido e a expensas da GT MEDICARE, quaisquer Produtos que o Revendedor alegue não estarem em conformidade ou estarem danificados para inspeção pela GT MEDICARE. A GT MEDICARE não aceitará reclamações que não sejam efectuadas de acordo com os requisitos e dentro dos períodos de tempo referidos neste parágrafo. A GT MEDICARE deverá, no caso de ser responsável pela não conformidade ou danos no Produto, à sua escolha, reparar os Produtos, substituí-los por novos Produtos ou devolver ao Revendedor o preço de compra dos Produtos. A GT MEDICARE não terá qualquer outra obrigação ou responsabilidade para com o Revendedor relativamente a Produtos não conformes ou danificados para além do estabelecido na frase anterior.
6. A duração da garantia dos aparelhos GT MEDICARE é de 24 meses para todas as partes mecânicas e electrónicas dos produtos, estando excluídos desta disposição os riscos e os danos. O período de garantia começa a partir do momento da entrega. O produtor só é obrigado a cumprir as obrigações decorrentes destas disposições de garantia. O produtor não é responsável por danos indirectos ou consequentes. Em todos os casos, a responsabilidade do produtor limita-se ao preço de venda dos produtos vendidos.
7. Se uma reclamação puder ser atribuída a uma modificação ou a uma utilização incorrecta do produto descrito no contrato, o regime de garantia não é válido em circunstância alguma.
8. Cada remessa de mercadorias será examinada imediatamente após a sua receção pelo destinatário. O cliente deve notificar a GT MEDICARE por escrito de quaisquer defeitos no envio no prazo de dez (10) dias após a receção. Se estes defeitos não forem comunicados por escrito num prazo de dez (10) dias, considera-se que o envio foi efectuado na íntegra. No caso de defeitos ocultos, que devem ser comprovados pelo cliente, as reclamações só são possíveis durante o período de garantia. Se a GT MEDICARE considerar que uma reclamação é bem fundamentada, GT MEDICARE será exclusivamente obrigada a substituir ou reparar os bens defeituosos, sem que o cliente possa, adicionalmente,



reivindicar qualquer direito a qualquer indemnização. A apresentação de uma reclamação nunca libertará o cliente das suas obrigações de pagamento.

Visão geral do produto

Obrigado por ter adquirido esta SmartCase.

A SmartCase contém os seguintes componentes:

SmartCase SC1230 e SC 1240

- Armário SmartCase AED (isolado)
- Adaptador de 24V
- Cabo de alimentação 3m (pré-instalado)
- Guia de instalação rápida
- Elemento de aquecimento elétrico e suporte para DAE
- Ventilador para ventilação ativa
- Iluminação LED (vermelho e azul)
- Alarime, >95dB
- Material de instalação

Material de instalação:



Anilhas (4x)

Porcas M8 (4x)

Separadores de nylon (4x)

Fichas de parede (4x)

Parafuso de fixação

SmartCase SC1240

- Chave

A SC 1240 está equipada com uma fechadura mecânica de código. Para este tipo de fechadura está incluída uma chave de reserva adicional.



Instalação

Importante O material de instalação fornecido destina-se apenas a ser suspenso numa superfície plana de madeira, pedra (tijolo) ou betão. Os painéis devem ter uma espessura mínima de 3 mm. Utilize sempre os espaçadores fornecidos. Recomendamos que o armário seja pendurado à sombra para evitar temperaturas elevadas no interior do armário.

Suspensão em pedra ou betão Faça 4 furos espaçados de 240 mm. Faça os furos de 10 mm a uma profundidade mínima de 60 mm para garantir uma profundidade suficiente para os tampões. Recomendamos que os furos superiores sejam efectuados a uma altura entre 1,5 m e 1,6 m acima do solo. Os furos devem ser sempre efectuados no meio da pedra (tijolo). Aparafuse os parafusos M8 nas buchas até ficarem 20 mm salientes da parede e coloque os espaçadores de nylon sobre os parafusos. Introduzir agora o cabo de alimentação antes de pendurar o armário na parede.




1: Introduzir as fichas e os parafusos



2: Colocar os espaçadores

Fonte de alimentação e cabo A GT MEDICARE recomenda que se faça um furo de 12 mm para passar o cabo de alimentação através da parede. Este pode então ser ligado ao adaptador de 24V, que deve ser colocado no interior da casa ou do edifício. É importante passar o cabo de alimentação através da parede antes de pendurar o armário na parede. O cabo de alimentação já está ligado ao interior da SmartCase (pré-instalado). Passe o cabo de fora para dentro e depois puxe-o mais para dentro a partir do interior. A SmartCase está agora pronta para ser pendurada na parede. Depois de colocar os parafusos de fixação, pode instalar as anilhas e as porcas para fixar a mala (no interior da mala).

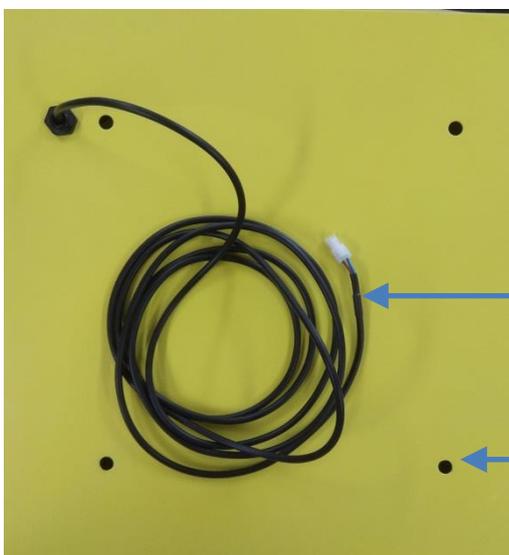


Cabo de

Furos de
montagem (4x)

Etapa final: colocação de anilhas e porcas M8 no interior



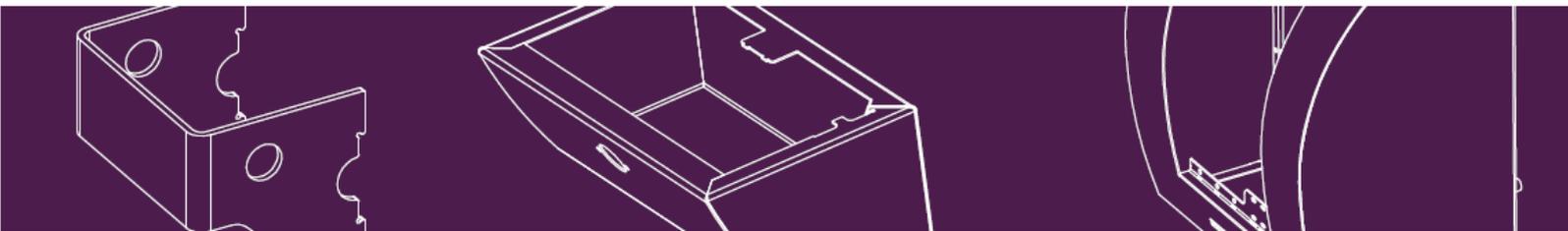

Atenção se a parede for fraca, recomendamos a utilização do Fischer VS 100P. Após a injeção do líquido nos orifícios, deve inserir apenas os parafusos de fixação. Não reutilize as buchas neste caso. Leia atentamente as instruções no rótulo da Fischer e certifique-se de que os furos estão completamente limpos após a perfuração.

Suspensão em madeira Faça pequenos furos de cerca de 4 mm de diâmetro na madeira, aparafuse as roscas firmemente na madeira e fixe a SmartCase como descrito acima. Recomendamos que os furos superiores sejam efectuados a uma altura entre 1,5 m e 1,6 m acima do solo.

Utilização

SC1230 (sem fechadura): Para fechar o armário, feche a porta e rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (90 graus). Para abrir o armário, rode o botão na direcção oposta (90 graus no sentido dos ponteiros do relógio) e puxe a porta na sua direcção.


SC1240 (bloqueio de código): Introduzir o código programado (código por defeito = 333) rodando as rodas numéricas e rodar toda a fechadura no sentido dos ponteiros do relógio. No caso de ter perdido o código, pode utilizar a chave para recuperar o código e, em seguida, abrir o armário: ver a secção de **regulação do código**.

Modificar o código: ver secção "personalizar o código"

Importante É obrigatório ter o código e a chave sempre disponíveis para o caso de uma chamada de emergência (aplicável à SC1240). Devido a um código defeituoso ou incorretamente programado, a fechadura pode não abrir quando o código é utilizado. Neste caso, é necessário dispor de uma alternativa para abrir o armário (chave). Para além disso, também é importante praticar os procedimentos acima referidos antes de guardar o DAE e repeti-los regularmente depois de o DAE estar instalado. Com a chave, o código programado pode ser recuperado (a chave não pode ser utilizada para abrir diretamente o armário): consulte a secção "personalizar código".



AVISO

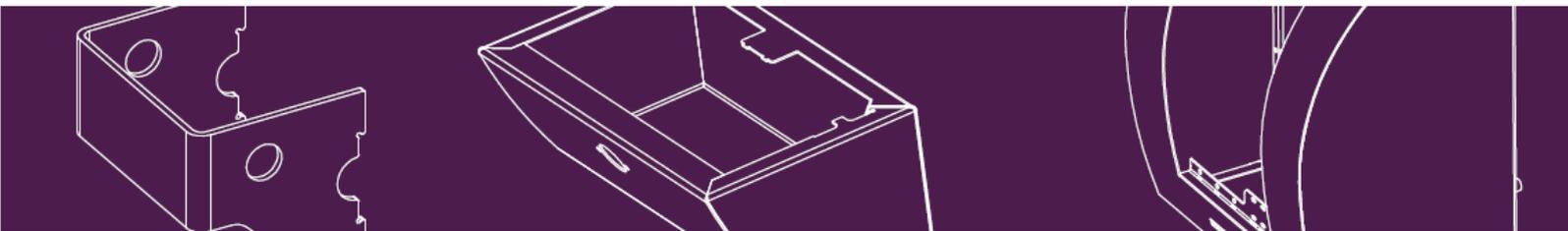

Manutenção e resolução de problemas

Manutenção É importante abrir e fechar a SmartCase (aplica-se apenas à SC1240) mensalmente para verificar se o sistema de bloqueio continua a funcionar corretamente. Ao fazer isto, é desejável rever também cuidadosamente o estado do DAE (consulte o manual do DAE para o efeito).

É também importante rever o estado geral do armário para detetar quaisquer danos que possam afetar o seu funcionamento.



AVISO

Se forem detectados danos, contacte o seu revendedor SmartCase. Dependendo dos danos, poderá ser aconselhável retirar o DAE da mala e informar os utilizadores do seu estado (não acionável).


Temperatura caso tenha dúvidas sobre o funcionamento do elemento de aquecimento elétrico (e a temperatura exterior seja inferior a 0°C / 32°F), retire o DAE e contacte o seu revendedor SmartCase. As SC1230/ 1240 estão equipadas com ventilação ativa. Por volta dos 30°C, a ventoinha liga-se para expelir o ar quente na parte superior e aspirar o ar frio na parte inferior da caixa. No entanto, recomendamos que coloque a caixa à sombra para evitar temperaturas elevadas (acima de 50°C).

Personalizar o código (SC1240)


Conselhos de segurança

1. Aquando da entrega, o código da fechadura de combinação foi definido de fábrica como 333.
2. Por razões de segurança, altere imediatamente o código para o seu código pessoal.
3. **Nunca deixe o número de rodas no seu código pessoal.**
4. O código pessoal deve ser introduzido para abrir a fechadura e para a fechar.
5. Se o código se perder, o cadeado pode ser aberto com a chave de serviço. Contactar o administrador para abrir o cadeado e alterar o código.

Abertura

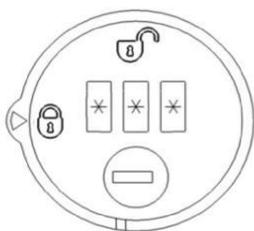


1. Aquando da colocação em funcionamento, introduzir primeiro o código de fábrica: 333. Ou utilize o seu próprio código pessoal (ver ponto "Personalizar código")

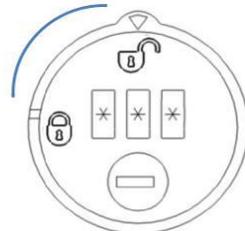


2. Rode o cadeado para (a fechadura abre-se)

Código de modificação

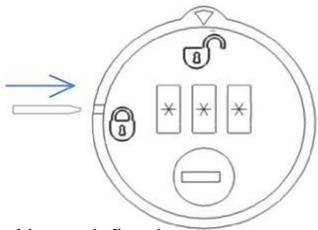


1. Na posição aberta e com o código introduzido, insira um pequeno alfinete (por exemplo, um clip de papel) no orifício de definição do código no lado do cadeado. Pressione o pino completamente para dentro e mantenha a pressão.

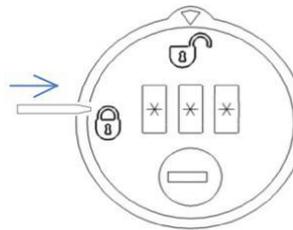


2. Introduzir um novo código pessoal
3. Retirar o pin (o código pessoal foi alterado)

Recuperar código

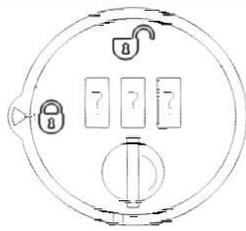

1. Introduzir a chave de serviço no cilindro da fechadura. Rodar a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

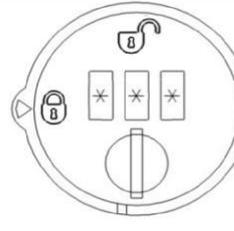


2. Rodar as rodas de código para cima até ficarem bloqueadas (código encontrado)
3. Volte a rodar a chave e retire-a

Verificar sempre o código ajustado abrindo a SmartCase com o novo código.




AVISO

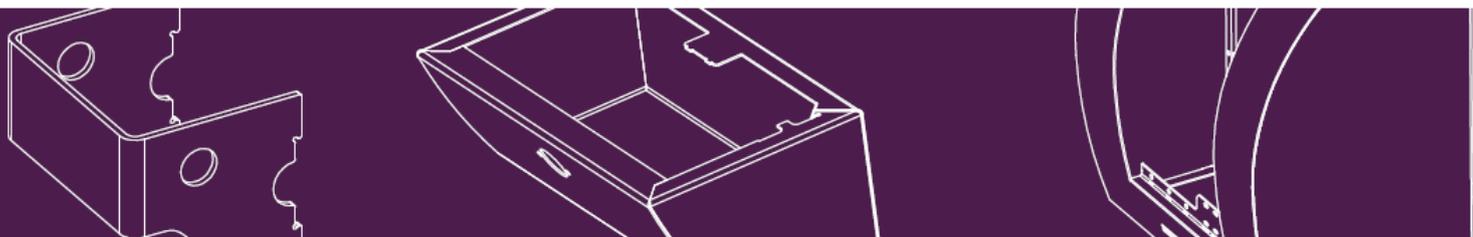

Resolução de problemas

Sintoma	Ação
A iluminação LED não funciona ou o alarme não funciona	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar a fonte de alimentação e o adaptador: o LED do adaptador deve estar continuamente aceso (um LED a piscar ou sem luz LED indica uma avaria) - Certifique-se de que todos os conectores estão corretamente ligados. (incluindo os conectores no interior do armário) <p>Se o armário continuar a funcionar mal, coloque-o fora de serviço e contacte o seu revendedor SmartCase.</p>
A temperatura (aquecimento) no armário não funciona corretamente	<p>A temperatura é controlada por sensores de temperatura no interior do armário. O aquecedor liga-se quando a temperatura exterior é inferior a 10-15°C e desliga-se quando a temperatura interior da cabina atinge 20-25°C. Nota: Para o funcionamento correto do aquecedor, a porta da cabina deve estar fechada.</p> <p>Se se suspeitar que o aquecedor não está a funcionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir a porta. O alarme deve disparar. Se o alarme não funcionar, siga os passos: "A iluminação LED não funciona ou o alarme não funciona". - Verifique a função de aquecimento no interior do armário, tocando na gaveta onde o DAE está colocado (a temperatura exterior deve ser < 0°C). A gaveta deve estar mais quente do que a temperatura exterior. Se não estiver: retire a caixa de utilização, retire o DAE e contacte o revendedor Smart case. <p>O aquecimento está continuamente ligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retirar o DAE. - Verificar se a porta do armário está corretamente fechada. Se a porta estiver aberta, feche-a. Aguarde 5 minutos e verifique se o aquecedor está desligado. - Se o dispositivo continuar a falhar, remova o DAE, retire-o de serviço, desligue-o da tomada e contacte o revendedor SmartCase.
O cadeado não abre quando é utilizado o código programado	<ul style="list-style-type: none"> - Reprogramar o código de acordo com este guia - Tente fechar e abrir o armário com o novo código <p>Se o cadeado continuar a não funcionar, contacte o seu revendedor SmartCase.</p>
O armário não fecha corretamente	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar se há alguma coisa a bloquear a porta. - Verificar se a fechadura ou a porta está deformada junto do mecanismo de fecho <p>Se o armário não puder ser reparado, coloque-o fora de serviço e contacte o seu revendedor SmartCase.</p>

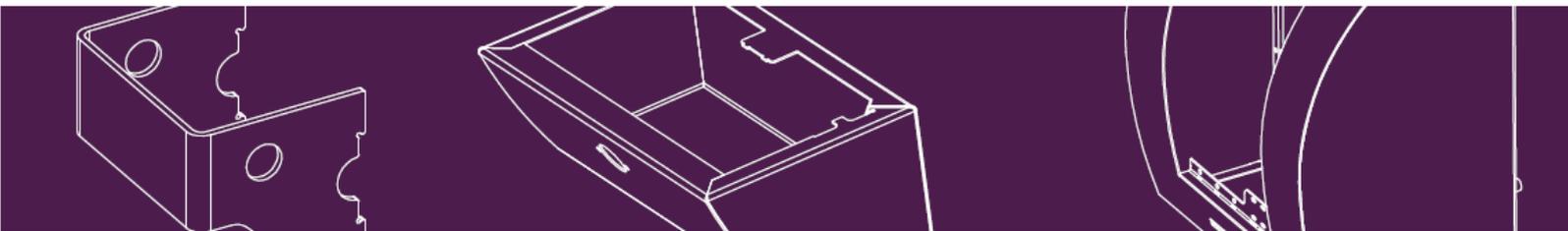

Glossário

DEA

O DAE (Desfibrilhador Automático Externo) é um dispositivo importante para assistência primária em caso de insuficiência cardíaca. É fundamental que o DAE esteja protegido, seguro e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para apoio imediato numa emergência.

Operador/utilizador

A pessoa responsável pelo armário e pelo DAE. A sua função é verificar o estado do DAE e do armário e garantir que o armário é utilizado de acordo com as instruções deste manual.

Serviço em linha

Para mais informações ou ajuda em linha, visite o nosso sítio Web em www.sixcase.com.

Manual do utilizador O manual contém todas as informações necessárias para a utilização da SmartCase. As actualizações são publicadas no nosso sítio Web.


Aviso Legal: A GT MEDICARE não é de forma alguma responsável pela disponibilidade ou utilização do DEA armazenado no armário SmartCase. A GT MEDICARE não se responsabiliza pela instalação, utilização ou utilização do armário/AED, nem pela perda de dados, rendimentos, direta ou indiretamente, nem por danos causados a terceiros. Condições excepcionais, tais como baixas temperaturas, componentes defeituosos ou outros factores externos podem fazer com que os DAE não possam ser utilizados. A GT MEDICARE reserva-se o direito de modificar ou melhorar este documento e todos os produtos relacionados neste manual sem aviso prévio.



AVISO

Contacto

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
Países Baixos
T +031 (0) 71 2100 229
E info@sixcase.com

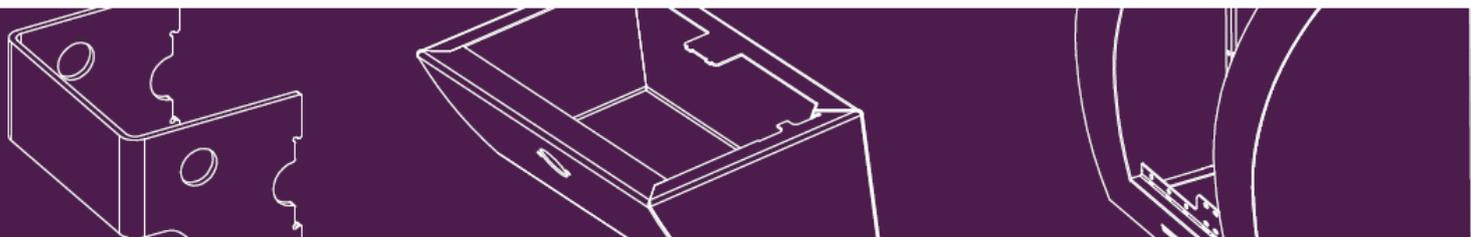

Apêndice A: Especificações técnicas

Especificações técnicas

Tipo de produto	SC1230 / SC1240
Peso	6 kg
Dimensões	40(h)x40(w)x20(d)cm
À prova de choque	IEC61439-5 cláusula 10.2.101.2/3
À prova de água	IP54
Arrefecimento	Ventilação ativa
Aquecimento	Elétrico até uma temperatura exterior de -20 °C
Resistente à corrosão	Aço inoxidável com revestimento
Janela	Polycarbonato resistente ao impacto
Kit de instalação	Fechado (madeira e pedra)
Alimentação eléctrica	Transformador de 24V (incluído)
Abertura	SC1230: Maçaneta da porta SC1240: Fechadura mecânica de 3 dígitos (independente da alimentação eléctrica)
Iluminação	LED vermelho e azul
Alarme acústico	+/- 95dB intermitente